

Návod na použitie

Automatický ramenný tlakomer ABPM-100



Názov a popis zobrazovaných symbolov na displeji

Definícia symbolu	Identifikácia	Poskytnuté informácie od výrobcu
Podrobnosti o výrobcovi		Výrobca
Číslo šarže		Číslo výrobnéj šarže
Zariadenie typu BF		Aplikačná súčiastka (manžeta) typu BF
Návod na použitie		Drž sa návodu na použitie
Notifikovaný orgán		
Európsky zástupca		Európsky zástupca
Elektrický a elektronický odpad (WEEE)		V EÚ by zariadenie nemalo byť likvidované spolu s ostatným domácim odpadom
Dátum výroby		
Sériové číslo		
Udržujte v suchu		



PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM TLAKOMERA, NAJMÄ TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní tohto produktu sa uistite, že dodržiavate všetky nižšie uvedené pokyny. Akákoľvek odchýlka od týchto pokynov môže spôsobiť zranenie alebo poranenie alebo ovplyvniť presnosť merania.

- Vždy zmerajte krvný tlak v rovnakom dennom čase, aby boli hodnoty porovnateľné.
- Pred meraním buďte aspoň 5 minút v pokoji.
- Keď musíte vykonať niekoľko meraní individuálne, ponechajte medzi nimi 5 minút pauzu.

- Nejedzte, nepite, nefajčite a neúčastňujte sa fyzicky činností po dobu najmenej 30 minút pred meraním.
- Pri samotnom meraní tlaku nehovorte, aby bola zaručená presnosť.
- Ak si nie ste istí o výsledku merania a máte pochybnosti, vykonajte ďalšie, nové meranie.
- Vykonané merania slúžia iba na informačné účely – nie sú náhradou pre riadne lekárske vyšetrenie.
- Informujte svojho lekára o vašich výsledkoch merania, ale nikdy si sami, na základe iba týchto meraní, nemeňte medikáciu alebo nevysádzajte lieky bez predchádzajúceho dohovoru s vaším lekárom.
- Nepoužívajte monitor krvného tlaku u novorodencov, tehotných žien a pacientok s preeklampiou.
- Nie je vhodné, aby ľudia s vážnou arytmiou používali tento elektronický sfýgmomanometer.
- Nepoužívajte inú, ako manžetu dodanú výrobcom, pretože hrozí nebezpečenstvo biokompatibility, čo môže viesť k chybnému meraniu.
- Ak trpíte chronickým alebo ťažkým cievnym ochorením (vrátane vazokonstrikcie), je proces merania na zápästí obmedzený. V tomto prípade použite ramenný merač krvného tlaku.
- Kardiovaskulárne ochorenie môže spôsobiť nesprávne alebo nepresné merania. To platí aj pre veľmi nízky krvný tlak, cukrovku, problémy s obehom, nepravidelný srdcový rytmus a zimnicu, horúčku alebo tras.
- Monitor nesmie byť používaný súčasne s akýmkoľvek vysokofrekvenčným chirurgickým zariadením.
- Zariadenie používajte iba na osoby, ktorých obvod paže je rovnaký ako pri zariadení.
- Vezmite prosím na vedomie, že počas nafukovania manžety môže byť príslušnej končatine bránené v pohybe.
- Pri meraní krvného tlaku nesmie byť obeh blokovaný dlhšie, než je nutné. Ak zariadenie nefunguje, odstráňte manžetu z ramena.
- Meranie nevykonávajte príliš často a vyhýbajte sa trvalému tlaku v manžete. To môže spôsobiť zníženie krvnej cirkulácie a môže dôjsť k zraneniu.
- Nepoužívajte manžetu na paži, tepny alebo žily, ktoré sú liečené, napr. kde je prítomné intravaskulárne prístupové zariadenie, ktoré je určené na intravaskulárnu liečbu alebo ak je tu arteriovenózný skrat.
- Nepoužívajte manžetu u osôb, ktoré prešli mastektómiou.
- Nepoužívajte manžetu na rany, mohlo by dôjsť k ich zhoršeniu.
- Manžetu nasadzujte iba okolo ramena. Nedávajte manžetu cez iné časti tela.
- Monitor krvného tlaku je napájaný iba batériami.
- Automatické vypnutie znamená, že pokiaľ nebude monitor používaný dlhšie ako minútu, prejde do úsporného režimu.
- Zariadenie je navrhnuté na použitie tak, ako je popísané v návode na použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym použitím.
- Prosím, nezdierajte manžetu s inými infekčnými osobami, aby sa zabránilo krížovej infekcii.
- Vyvarujte sa kompresie alebo obmedzeniu spojenia hadičky počas merania, čo môže spôsobiť chybu

nafúknutia alebo zranenia v dôsledku trvalého tlaku v manžete.

- Tento elektronický sphygmomanometer je navrhnutý pre dospelých a nikdy by sa nemal používať u dojčiat alebo malých detí. Poradte sa so svojím lekárom pred použitím u starších detí.

POKYNY NA SKLADOVANIE A ÚDRŽBU

- Monitor je vyrobený z presných elektronických komponentov. Presnosť nameraných hodnôt a životnosť zariadenia závisí od opatrného zaobchádzania:
 - Chráňte zariadenie pred nárazmi, vlhkosťou, špinou, výrazným kolísaním teplôt a priamym slnečným svetlom.
 - Zabráňte pádu zariadenia.
 - Nepoužívajte zariadenie v blízkosti silných elektromagnetických polí a držte ich ďalej od bezdrôtových alebo prenosných telefónnych zariadení atď.
- Ak zariadenie nie je používané dlhšiu dobu, odporúča sa vybrať batérie.



POZNÁMKY K BATÉRIÁM

Pokiaľ dôjde ku kontaktu kvapaliny z batériového článku s kožou alebo očami opláchnite postihnutú oblasť vodou a vyhľadajte lekára.



Nebezpečenstvo požitia! Malé deti by mohli prehltnúť batérie a udusiť sa. Majte batérie mimo dosahu detí!

- Skontrolujte polaritu - symboly plus (+) a mínus (-).
- Pokiaľ došlo k úniku tekutiny z batérie, nasadte si ochranné rukavice a vyčistite priehradku na batérie pomocou suchej handričky.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom.



Nehádzajte batérie do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!!!


- Nepokúšajte sa dobíjať batérie.
- Vyberte batérie z priehradky na batérie, ak zariadenie nebudete používať po dlhšie časové obdobie.
- Používajte iba identické alebo ekvivalentné batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne.
- Nepoužívajte dobijacie batérie.
- Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nerozbíjajte.

INŠTRUKCIE NA OPRAVU A NA ODSTRÁNENIE

- Batérie sa nesmú likvidovať s domovým odpadom.
- Vezmite prosím vybité batérie na zberné miesta určené na tieto účely.
- Neotvárajte zariadenie. Nedodržanie týchto pokynov môžete zrušiť záruku.
- Zariadenie sami neopravujte ani neupravujte. Ak ste tak urobili, bezpečnú prevádzku zariadenia už nemožno zaručiť.
- Iba oddelenie služieb zákazníkom alebo oprávnený prevádzkovateľ môže vykonávať akékoľvek opravy.
- Pred uplatnením akéhokoľvek nároku však skontrolujte stav batérií vopred a vymeňte ich, ak je to potrebné.


- V záujme ochrany životného prostredia by nemalo byť zariadenie likvidované s ostatným domácim odpadom na konci svojej použiteľnosti. Malo by byť zlikvidované na autorizovaných zberných miestach vo vašej krajine. Zariadenie musí byť zlikvidované v súlade s európskymi WEEE (Odpadové elektrické a elektronické zariadenia). Ak máte k tomu nejaké otázky, prosím kontaktujte miestne orgány zodpovedné za likvidáciu a recykliáciu týchto produktov.

OPIS PRÍSTROJA

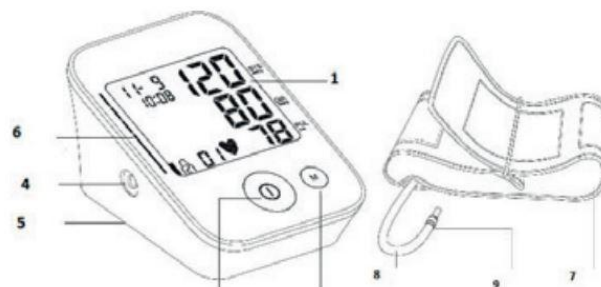

1. Displej
2. Tlačidlo Štart / Stop
3. Tlačidlo Pamäť
4. Pripojenie manžety k tlakomeru
5. Priehradka pre batérie
6. Stupnica pre vyhodnotenie výsledkov meraní
7. Manžeta
8. Hadička manžety
9. Pripojenie k manžete

ZOBRAZENIE DISPLEJA

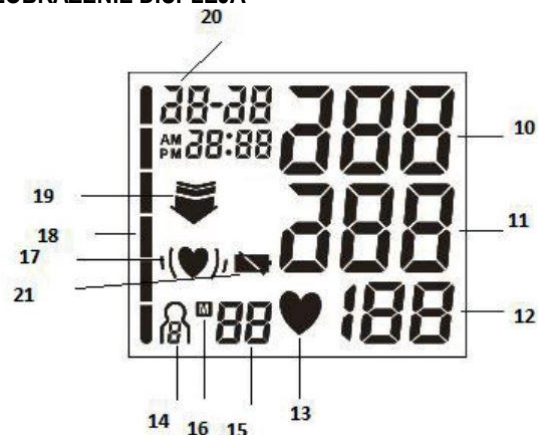

10. Systolický tlak
11. Diastolický tlak
12. Tepová frekvencia
13. Symbol pulzu
14. Užívateľská pamäť
15. Číslo umiestnenia zálohy / priemerná pamäťová hodnota (AL), ráno (A), večer (P)
16. Symbol funkcie pamäte
17. Symbol nepravidelného srdcového rytmu
18. Poradie výsledkov meraní
19. Deflácia
20. Dátum a čas
21. Symbol výmeny batérie

VLOŽENIE BATÉRIÍ

- Odstráňte kryt priestoru pre batérie (5) na ľavej strane zariadenia.

- Vložte štyri 1,5 V mikro batérie (alkalické LR03 - nie sú súčasťou balenia).
- Musíte vložiť batérie podľa ilustrovanej polarity. Nepoužívajte dobijacie zariadenie na batérie.
- Opatrne zatvorte kryt priestoru pre batérie.
- Ak sa objaví symbol výmeny batérie (21), je potrebné vymeniť všetky batérie.

VYBRATIE BATÉRIÍ

- Vybité batérie musia byť zlikvidované v špeciálnych kontajneroch, zberných miestach, alebo vrátené predajcovi elektrických spotrebičov. Máte zákonnú povinnosť riadne zlikvidovať vybité batérie.

NASTAVENIE DÁTA A ČASU

Táto ponuka umožňuje nastaviť nasledujúce položky jednu po druhej: Čas → Dátum → Formát hodín.

Dátum a čas musíte nastaviť. Bez týchto úprav nie je možná registrácia a čítanie vašich meraní s presným dátumom a časom.

FORMÁT ČASU

- Stlačte a podržte tlačidlo STOP / ŠTART (2) a Tlačidlo Pamäť (3) súčasne na 3 sekúnd alebo vložte batérie.
- Pomocou tlačidla pamäte (3) vyberte požadovaný formát času a potvrdte stlačením Tlačidlo STOP / ŠTART (2).

DÁTUM

- Na obrazovke blíkajú rok. Použitím tlačidlo pamäte (3), vyberte rok, ktorý požadujete a potvrdte stlačením tlačidla STOP / ŠTART (2).
- Na obrazovke blíkajú mesiac. Za použitia tlačidlo pamäte (3), vyberte požadovaný mesiac a potvrdte stlačením STOP / ŠTART tlačidlo (2).
- Na obrazovke blíkajú Deň. Za použitia tlačidlo pamäte (3), vyberte požadovaný deň a potvrdte stlačením tlačidla STOP / ŠTART (2).



Pokiaľ bol upravený formát času do 12 hodín, poradie dňa a zobrazený mesiac je obrátené.


ČAS

- Na obrazovke blíkajú čas. Použitím tlačidla pamäte (3) vyberte požadovaný čas a potvrdte stlačením tlačidla STOP / ŠTART (2).
- Na obrazovke blíkajú minúty. Za použitia tlačidla pamäte (3) vyberte minúty, ktoré požadujete a potvrdte stlačením STOP / ŠTART (2).
- Hneď ako sú všetky dáta upravené, zariadenie sa automaticky vypne.

MERANIE KRVNÉHO TLAKU

UMIESTNENIE MANŽETY

- Upevniť manžetu na holú ľavú ruku. Obeh vašej paže nesmie byť obmedzený príliš tesným oblečením alebo čímkoľvek iným.
- Umiestnite manžetu na svoju ruku tak, aby bol spodný okraj 1 - 2 cm nad ohybom lakťa a nad tepnou. Hadička je smerovaná doprostred dlane.
- Teraz upevnite voľnú časť manžety okolo paže pomocou suchého zipsu a ponechajte priestor na dva prsty.

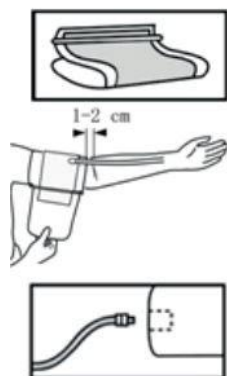

- Teraz pripojte hadičku manžety k tlakomeru.

Zariadenie sa smie používať iba s originálnou manžetou. Manžeta je určená pre obvod paže 22 až 30 cm.

NASTAVENIE DO SPRÁVNEJ POZÍCIE

- Pred vykonávaním akéhokoľvek merania si odpočítajte po dobu aspoň 5 minút. Inak by mohlo dôjsť k nepresnému meraniu.
- Meranie je možné vykonávať iba v sede. V každom prípade sa uistite, že je manžeta na úrovni srdca.



- Pred samotným meraním si urobte pohodlie. Uistite sa, že váš chrbát a vaše ruky sú dobre opreté o operadlo

a podrúčky. Nemajte nohy cez seba.

- Aby nedošlo k skresleniu výsledku, je dôležité pri meraní zostať pokojný a nehovoriť.

MERANIE KRVNÉHO TLAKU

- Umiestnite manžetu, ako je popísané vyššie, a usadte sa do správnej pozície pre meranie.
- Ak chcete spustiť monitor, stlačte tlačidlo STOP / ŠTART (2). Celý displej sa krátko rozsvieti.
- Ak chcete vybrať požadované miesto v pamäti, stlačte tlačidlo pamäte (3) a vyberte jedného zo štyroch užívateľov.
- Výsledky meraní 4 rôznych ľudí alebo Ranné a večerné priemery sa zaznamenávajú samostatne do štyroch užívateľských skupín. Každá skupina má pamäť na 30 posledných meraní.
- Monitor automaticky začne proces merania.
- Proces merania môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla STOP / ŠTART (2). Hneď ako bude rozpoznaný pulz, zobrazí sa na displeji symbol pulzu.
- Výsledky meraní systolického tlaku (10), diastolického tlaku (11) a pulzu (12) sú zobrazené. Symbol nepravidelného srdcového tepu (ak existuje) (17) a symbol pre hodnotenie výsledkov meraní (18) blíkajú.
- Er_ sa zobrazí, ak proces merania nebol vykonaný správne. Prečítajte si kapitolu Chybové hlásenie / Oprava chýb podľa týchto pokynov na použitie a zmerajte tlak znova.
- Vypnite monitor stlačením tlačidla STOP / Tlačidlo ŠTART (2). Výsledok merania je potom zaznamenaný v užívateľskej pamäti, ktorú ste vybrali.
- Ak zabudnete zariadenie vypnúť, vypne sa automaticky približne po 1 minúte.
- Pred ďalším použitím počkajte aspoň 5 minút po meraní.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV

NEPRÁVIDELNÝ SRDCOVÝ TEP

Toto zariadenie dokáže identifikovať akýkoľvek nepravidelný srdcový rytmus počas procesu merania. Pokiaľ k nepravidelnému srdcovému rytmu dôjde, zobrazí sa po meraní symbolom (17) na displeji.

- Nepravidelný srdcový rytmus môže znamenať arytmiu. Aritmia je choroba charakterizovaná anomáliou srdcovej frekvencie, ktorá je spôsobená poruchami v bioelektrickom systéme. Príznaky (srdce bije neskoro alebo skoro, rýchlejší alebo pomalší pulz) spôsobené najmä srdcovými chorobami, vekom, prirodzenou predispozíciou, príliš bohatou diétou, stresom alebo dokonca nedostatkom spánku. Aritmiu môže určiť iba lekár po konzultácii. Ak sa po meraní zobrazí symbol

nepravidelného srdcového tepu, skúste nové meranie. Uistite sa, že ste pred samotným meraním odpočívali po dobu 5 minút a počas merania nehovorte ani sa nehýbte. Ak sa symbol zobrazuje často, obráťte sa na vášho lekára. Autodiagnostika a samoliečba založená na výsledkoch procesu merania môže byť nebezpečná. Musíte postupovať podľa pokynov svojho lekára.

RIADENIE VÝSLEDKOV MERANIA

- Výsledky procesu merania sú zoradené a vyhodnotené podľa nižšie uvedenej tabuľky. Tieto hodnoty je možné použiť iba pre informačné účely, pretože krvný tlak sa líši človek od človeka, podľa veku atď.
- Je dôležité výsledky pravidelne konzultovať s lekárom. Lekár vám poskytne vaše vlastné hodnoty normálneho krvného tlaku a hladinu krvného tlaku, ktorá je považovaná za nebezpečnú. Poradie sa zobrazuje rovnako ako meradlo zariadenia na stanovenie rozsahu, v ktorom bol krvný tlak zmeraný. Pokiaľ sú systolické a diastolické hodnoty vo vnútri dvoch rôznych rozsahov (napr. systolický v „normálnom vysokom“ rozsahu a diastolický v „normálnom“ rozmedzí), značky stupnice v grafe budú vždy uvedené najvyšší rozsah na zariadení, tj „normálny“ vysoký „v tomto príklade.

Rozsah hodnôt krvného tlaku	Systolický (mmHg)	Diastolický (mmHg)	Zobrazená farba
Level 3: Akútna hypertenzia	≥ 180	≥ 110	Červená
Level 2: Stredne pokročilá hypertenzia	160 – 179	100 - 109	Oranžová
Level 1: Mierna hypertenzia	140-159	90 - 99	Žltá
Normálne - zvýšený	130 - 139	85 - 89	Zelená
Normálna	120 - 129	80 - 84	Zelená
Optimálna	<120	<80	Zelená

Zdroj: WHO, 1999 (Svetová zdravotnícka organizácia)

OBNOVENIE A ODSTRÁNENIE MERANEJ HODNOTY

- Výsledky každého úspešného merania sú zaznamenané s dátumom a časom. Keď sa zhromaždí viac ako 30 nameraných dát u jedného používateľa, najstaršie meranie sa automaticky zmaže.
- Stlačením tlačidla pamäte (3) zobrazíte výsledky merania. Vyberte užívateľa a zobrazí sa počet zaznamenaných výsledkov.
- Stlačením tlačidla STOP / START (2) vyberte iného užívateľa a potvrdíte stlačením pamäte tlačidlo (3).
- Potom sa zobrazí priemerná hodnota (AL) (15) všetkých hodnôt nameraných a zaznamenaných pre tohto užívateľa.
- Pokiaľ v pamäti vybraného užívateľa nebude žiadny výsledok na LCD displeji sa zobrazí „0“ pre krvný tlak a pre meranie pulzu.

- Stlačte tlačidlo pamäte (3). Na displeji sa rozblíka symbol A7. Zobrazuje sa priemerná hodnota ranných meraní za posledných 7 dní (ráno: 5:00 - 9:00).
- Stlačte tlačidlo pamäte (3). Na displeji sa rozblíka symbol P7. Zobrazuje sa priemerná hodnota večerných meraní za posledných 7 dní (večer: 18:00 - 20:00).
- Ak znovu stlačíte tlačidlo pamäte (3) znovu sa na displeji zobrazí posledné meranie. Symbol nepravidelného srdcového tepu (ak existuje) (17) a symbol pre hodnotenie výsledkov merania (18) blikajú.
- Ak znova stlačíte tlačidlo pamäte (3), môžete sa pozrieť na vaše individuálne meranie.
- Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo STOP / START (2).
- Ponuku môžete kedykoľvek opustiť stlačením tlačidla STOP / ŠTART (2)

ZMAZANIE NAMERANÝCH HODNÔT

- Ak chcete vymazať záznamy konkrétnej užívateľskej pamäte, najskôr vyberte užívateľa.
- Pre zmazanie výsledkov podržte tlačidlo pamäte (3) po dobu 3 sekúnd.

CHYBOVÉ HLÁSENIA / OPRAVY CHYBY

Problém	Dôvod	Riešenie
Na displeji sa zobrazí abnormálny výsledok	Manžeta je v zlej pozícii alebo nie je dosť utiahnutá	Nasadte si správne manžetu a opakujte meranie
	Počas merania nemáte správne držanie tela	Znova si prečítajte, aká má byť poloha tela počas merania a skúste to znova.
	Pohyb ramena alebo tela, nervozita alebo rozrušenie alebo rozprávanie počas procesu merania	Skúste sa zmerať znova a dodržujte pokyny uvedené v návode na použitie.
	Srdcový tep je nepravidelný (arytmia)	Tlakomer nie je určený ľuďom, ktorí trpia vážnou arytmiou

- V prípade chyby sa zobrazí chybové hlásenie na obrazovke Er_.
- Chybové hlásenia sa môžu zobrazíť, keď:
 - Systolický alebo diastolický tlak nebol zmeraný (na obrazovke sa zobrazuje ER1 alebo ER2)
 - Systolický alebo diastolický tlak je mimo merací rozsah (na displeji sa zobrazí „Hi“ alebo „Lo“)
 - Manžeta je príliš tesná alebo príliš voľná (na obrazovke sa zobrazí ER3 alebo ER4)
 - Krvný tlak je vyšší ako 300 mmHg (na displeji sa zobrazí ER)
 - Nafukovanie trvá dlhšie ako 180 sekúnd (na displeji sa zobrazí ER6)

- V systéme alebo zariadení došlo k chybe (Na obrazovke sa zobrazí ER7, ER8 alebo ERA)
- Batérie sú takmer vybité (18).

OPIS TECHNICKÉHO ALARMU

Ak je nameraný krvný tlak (systolický alebo diastolický) mimo rozsahu uvedeného v odseku „Technické funkcie“ zobrazí sa na obrazovke ikona „Hi“ alebo „Lo“. V tomto prípade sa poraďte s lekárom alebo skontrolujte, či zariadenie používate správne. Limitné hodnoty technického alarmu sú hodnoty nastavené výrobcom a nie je možné ich zmeniť ani deaktivovať. Podľa IEC 60601-1-8 tieto hodnoty alarmu nemajú vysokú prioritu. Technický poplach nie je uzamknutým poplachom a nie je potrebné ho resetovať. Signál zobrazený na obrazovke sa automaticky vypne približne po 8 sekundách.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Zariadenie a manžetu starostlivo čistite iba pomocou ľahko navlhčenej handričky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Nikdy nedávajte zariadenie ani manžetu do vody. Voda by mohla preniknúť do zariadenia alebo manžety a poškodiť ich.
- Na zariadenie ani manžetu nekladte ťažké predmety. Pokiaľ nebudete tlakomer dlhší čas používať, odstráňte batérie.
- Odporúča sa kontrolovať prístroj každé 2 roky alebo po oprave. Prosím, kontaktujte servisné stredisko.
- Monitor môže udržiavať bezpečnostné a výkonné charakteristiky minimálne 10 000 meraní alebo tri roky.
- Integrita manžety je približne 1000 cyklov pripnutia a odopnutia.
- Odporúčame manžetu dezinfikovať 2krát týždenne, pokiaľ je to potrebné (napr. v nemocnici alebo na klinike).
- Vnútornú stranu manžety utrite mäkkou tkaninou navlhčenou v etylalkohole (75-90%), potom manžetu usušte.
- Odporúča sa vyčistiť manžetu po každom dvojstom použití.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Číslo produktu	LA090206
Metóda merania	Meranie krvného tlaku na paži, oscilometrická a neinvazívna metóda merania
Rozsah merania	Tlak v manžete 0 – 300 mmHg; Systolický tlak 60 – 260 mmHg; Diastolický tlak 40 – 199 mmHg; Pulz 40 - 180 tepov / minútu
Pamäť	4 x 30 záznamov
Rozmery	+/- 107 x 80 x 52 mm
Hmotnosť	+/- 287 g (bez batérii)
Manžeta na paži	22 – 30 cm
Prevádzkové podmienky	+ 10°C a + 40°C, ≤85% relatívnej vlhkosti (nekondenzované)
Skladovacie podmienky	- 20°C a + 50°C, ≤85% relatívnej vlhkosti, 800 – 1 050 hPa okolitého tlaku
Napájanie	4 x batéria 1.5 V AAA
Životnosť batérie	Približne 200 meraní
Príslušenstvo	Návod na použitie, púzdro so zipsom

Poradie	Interné napájanie, IP20, bez AP alebo APG, nepretržité používanie, BF zariadenia
Komponenty na meranie tlaku	Pumpa, ventil, LCD, manžeta, senzor

Môže dôjsť k technickým zmenám bez predchádzajúceho upozornenia za účelom vývoja produktu.

- Toto zariadenie zodpovedá európskej norme EN60601-1-2 a spĺňa špeciálne bezpečnostné požiadavky týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility. Vezmite prosím na vedomie, že HF prenosné a mobilné komunikačné zariadenia pravdepodobne môžu ovplyvniť prístroj. Pre viac informácií alebo prípadnú konzultáciu, prosím, kontaktujte popredajný servis na uvedenej adrese na konci návodu na použitie.
- Toto zariadenie vyhovuje európskej smernici 93/42 / EHS pre lekárske výrobky, Zákomom o lekárske výrobky a európskej norme EN1060-1 (týkajúce sa neinvazívnych zariadení na monitorovanie tlaku, časť 1: Všeobecné požiadavky), EN 1060-3 (vzťahujúce sa na neinvazívne zariadenia na sledovanie krvného tlaku, časť 3: Doplnkové požiadavky EC80601-2-30 (Elektrické lekárske vybavenie, časti 2-30: Zvláštne požiadavky pre bezpečnosť, vrátane základného výkonu, automatického neinvazívneho monitorovacieho zariadenia krvného tlaku).
- Presnosť tohto monitora krvného tlaku bola správne testovaná a jeho trvanlivosť bola navrhnutá pre dlhodobé použitie. Pokiaľ je zariadenie využívané na lekárske účely, musia sa vykonávať technické kontroly. Pre presné informácie ako skontrolovať presnosť zariadenia, zašlite požiadavku na popredajný servis.



ODPORÚČANÁ LIKVIDÁCIA ODPADOV

Všetky obaly sú zložené z materiálov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre životné prostredie, a ktoré môžu byť zlikvidované v miestnom zbernom dvore. Kartón zlikvidujte v miestnom triediacom centre, používa sa ako druhotná surovina. Kartón môže byť tiež zlikvidovaný v recyklačnom zásobníku na papier. Obalová fólia musí byť odvezená do miestneho recyklačného strediska. Až nebudete zariadenie používať, prosím zlikvidujte ho spôsobom šetrným k životnému prostrediu av súlade so zákonom. Pred likvidáciou, prosím vyberte batérie a zlikvidujte ich v zbernom mieste pre ich ďalšiu recykláciu.



Za žiadnych okolností nelikvidujte batérie s domácim odpadom.

EC0197 Potvrdenie o zhode

Lekársky prístroj kategórie IIa

Lanaform potvrdzuje, že zdravotnícka pomôcka „ABPM-100“ Lot001 LA090206 vyhovuje európskym predpisom Smernice 93/42/ES o zdravotníckych pomôckach a prípravkoch a jeho poslednej zmene 2007/47/ES.

Distribútor pre ČR a SR:

CM Trade Via, sro
Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno
Tel.: +420 549 274 164, e-mail: info@cm-trade.cz

Výrobca

Andon Health CO., LTD.
No. 3 Jinping Street, Ya An Road
Nankai District , Tianjin 300190, PRC

EC-REP

LOTUS GLOBAL CO., LTD.
1 Four Seasons Terrace , West Drayton , Middlesex , London, UB7 9GG
United Kingdom

Dovozca:

LANAFORM SA, Rue de la Legendé 55
4141 Louveigné , Belgicko, www.lanaform.com

Verzia: 20. 2. 2024