

NABÍJACIE BATÉRIE K INHALÁTORU NORDITALIA MO-03

Dôležité upozornenia:

- Nabíjacia batéria (voliteľné príslušenstvo) sa používa na napájanie prístroja ako alternatíva k adaptéru. Za týmto účelom používajte iba a výhradne dodanú nabíjaciu batériu.
- Nabíjacie batérie sa nesmú používať na iné prístroje alebo na iné účely, než aké sú uvedené v tomto návode.
- Nevystavujte batériu vysokej vlhkosti alebo vysokým teplotám (napr. zdrojom tepla, priamemu slnečnému svetlu atď.).
- Nekladte batériu na mokré povrchy.
- Nabíjaciu batériu nenamáčajte. Dbajte najmä na to, aby ste do zásuviek napájania v hornej časti nedostali tekutiny a/alebo ostré predmety.
- V prípade nesprávneho použitia alebo skladovania (batéria úplne ponorená vo vode alebo skladovaná v tesnom kontakte so zdrojmi tepla) sa batéria môže prehriať av extrémnych prípadoch vybuchnúť.
- Batériu je možné nabiť až približne 300-krát. Jej životnosť je však premenlivá v závislosti od toho, ako sa používa, skladuje a nabíja.
- Na nabíjanie batérie používajte iba a výhradne dodaný adaptér.
- Je normálne, že sa batéria počas nabíjania a používania zahrieva.
- Vysoké alebo nízke teploty obmedzujú prevádzku batérie.
- Pri dlhodobom úplnom vybití môže dôjsť k poškodeniu batérie. Nabíjajte ju aspoň každé tri mesiace.
- Nabíjanie batérie je neustále sledované. Keď sa rozsvieti blikajúci symbol batérie, prístroj sa približne po 2 minútach vypne. Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, rozsvieti sa blikajúci symbol nedostatku vody a prístroj sa okamžite vypne.
- Batérie nijako neatvárajte a nezasahujte do nej.
- Nevystavujte batériu priamemu kontaktu s ohňom.
- Neskratujte kontakty batérie.
- Nepoužívajte batériu, ak je poškodená.

NABÍJANIE BATÉRIE

Pripojte adaptér k napájacej zásuvke nabíjacej batérie. Pripojte adaptér k sieťovej zásuvke. Pokiaľ je batéria vybavená LED kontrolkou, bude počas nabíjania blikáť modrá LED kontrolka. Keď je batéria plne nabitá, LED kontrolka zhasne.

Nenechávajte batériu nabíjať dlhšie ako dvanásť hodín. Prebíjanie môže spôsobiť riziko skrátenia životnosti batérie. Zabráňte nadmernému vybíjaniu batérie. Ak prístroj signalizuje vybitú batériu rozsvietením symbolu, okamžite ho vypnite. Nabite ho čo najskôr. Úplne nová a nabitá batéria má približne 45 minút autonómie. Je normálne, že batéria postupom času stráca výkon.

POUŽITIE BATÉRIE

Nabíjaciu batériu umiestnite na rovný povrch.

Jemne položte batériu na telo rozprašovača tak, aby sa obe časti správne spojili. Správne spojenie je indikované rozsvietením LED kontrolky. Pokiaľ nie je batéria zasunutá správne, netlačte na ňu silou: činnosť jemne opakujte.

Prístroj používajte podľa pokynov v časti „Pokyny na použitie“. Na konci liečby opatrne vyberte batériu z rozprašovača tak, aby nedošlo k rozliatiu kvapalín.

Pokiaľ batériu nepoužívate, vždy ju z rozprašovača vyberte. Ponechaním batérie omylom v prístroji sa batéria vybije.