

Představení

Tato jednotka obsahuje 2 speciální trubice vyzařující světlo s vlnovou délkou 652 a 940 nm.

Návod k obsluze

1. Otevřete kryt baterii a vložte 1 ks baterie 9V.
2. Stisknete tlačítko ON/OFF, vlny jsou aktivovány
3. Vložte nosní trubice do nosu tak, aby to pro vás bylo pohodlné
4. Jednotka se po 3 minutách provozu automaticky vypne. Jeden léčebný cyklus je okolo 3 minuty.
5. Během léčby stiskem tlačítka ON/OFF vypnete jednotku

Pro nejlepší výsledky léčby používejte jednotku 3 týdny 2-3x denně.

Výměna baterie

Pokud bude výkon nízký, tak indikační světlo začne blikat. Vyměňte baterii.

Možné problémy

Jestliže přístroj nejde zapnout nebo léčivé světlo není aktivováno, vyměňte baterie.

Údržba

Nebudete-li jednotku delší dobu používat, tak vyjměte baterii.

Výrobek není vodotěsný, neponořujte ho do vody ani jiných kapalin. Chraňte před vlhkem.

Po každém použití vydezinfikujte nosní trubičky lihem. Nepoužívejte agresivní rozpouštědla a čisticí prostředky.

Patent

Tento výrobek je chráněn patentem pro aplikaci technologie a pro užití speciálních vln uvnitř nosních dutin.

Model: SN-206

Název: Sneezer Beam

Léčebná technologie: dvojitá vlnová délka použita k fototerapii

Umístění trubic: nosní dírky

Použitá vlnová délka: 652 nm a 940 nm

Režim emise světla: pulsní režim

Výkon světla: 3 mW do každé trubičky

Energetická dávka za jednotku léčby: 1 Joule

Provozní doba: cca 3 minuty

Pracovní teplota, vlhkost: 15 - 40 °C, 30 - 80 % ReH

Skladovací teplota, vlhkost: -10 - 60 °C, 30 - 80 % ReH

Baterie: 9 V, Heavy duty dry battery (1 ks, není součástí balení)

Životnost baterie: přibližně 100 cyklů

Rozměry: 7,8 x 6,5 x 3,1 cm

Hmotnost: 80 g

Technické specifikace se mohou v průběhu produkce obměnit bez předchozího upozornění.

Výrobce: Mesure Technology Co., Ltd., 7F, 86, Sec. 1, Kwangfu Road, Sanchung City, Taipei, Taiwan

Autorizovaný zástupce v EU: ECOclima McGregor, Olga Slezia, ul. 11-go Listopada 97, 41-800 Zabrze, Poland

Distributor: CM Trade Via, s.r.o., Olomoucká 3419/7, 61800 Brno, E-mail: info@cm-trade.cz